

JALOSOME Ağız İçi Bariyer Jel

Jalosome™ Ağız İçi Bariyer Jel

Ağız içi Mukozit tedavisinde kullanılan tıbbi bir jeldir.

ÜRÜN TANIMI:

JALOSOME Ağız içi Bariyer Jel, Ağız içi mukozitlerin ağrılı semptomlarının kontrolü için kullanılan bir üründür. Oral Bariyer Jel, muko-yapışkanlık (mucoadhesive) özelliği sayesinde mukoza üzerinde koruyucu bir bariyer oluşturur. Oluşan koruyucu film tabakası, ağız içini nemlendirir, kayganlaştırır ve zararlı faktörlerden korur. Hücre yenilenmesini destekler.

KULLANIM ALANLARI:

- Radyoterapi nedeniyle oluşan Mukozitler
- Kemoterapi nedeniyle oluşan Mukozitler
- Aft
- Ülser
- Aftöz Stomatitis
- Ağız içi cerrahi müdahale
- İmplantoloji (Diş implant tedavisi)
- Protezlerden ve Ortodontik müdahalelerden kaynaklanan travmatik ülserler



AĞIZ İÇİ MUKOZİT GÖRÜLME OLASILIĞI:

- %30 - %40 Kanser Hastaları
- %85 Baş – Boyun Kanser Hastalarında

İÇERİĞİ:

- **Hiyalüronik Asit**
 - Hücre yenilenmesini destekler, iyileştirici ve Anti-İnflamatuar etkisi vardır.
- **Pantenol**
 - Yüksek nemlendirme özelliğine sahiptir. İnflamasyonu azaltır ve ilgili ağrıyı tedavi eder.
- **Aloe Vera Jel**
 - Mukozada koruyucu bir bariyer oluşturur ve mukozitin ağrılı semptomlarını tedavi eder.
- **Althaea Pitokopleks**
 - Semptomları yatıştırmak ve tahrişlerden korumak için koruyucu bir bariyer oluşturur.

JALOSOME Ağız İçi Bariyer Jel

İÇERMEZ:

- Laktoz
- Gluten

KULLANIM ŞEKLİ:

- İhtiyaca göre GÜNDE 3 defaya kadar kullanılır.
- Ellerinizi yıkayınız.
- Tekli pakette bulunan Jalosome Ağız İçi Bariyer Jelin tamamını ağız içine sıkınız ve Jeli ağız içinde gezdiriniz.
- Jelin ağız içinde damak, dil, yanak içleri ve tüm çevresel dokulara yayıldığından emin olunuz.
- Ağız içinde fazlalık kalan Jeli tükürün.
- 30 DAKİKA yemek yemeyiniz ve hiçbir sıvı içmeyiniz.

SINIFLANDIRMA:

- Sınıf IIb Tıbbi Cihaz

HÜCRE YENİLEYİCİ
ETKİ

AĞRI KESİCİ
ETKİ

İNFLAMASYON
ÖNLEYİCİ ETKİ

NEMLENDİRİCİ
ETKİ

MUKOZAYI
KORUR



radyo
terapi
jeli.com

radyoterapijeli.com
T : +90 312 441 6265
F : +90 312 441 6267
M: +90 530 711 5989
info@seles.co

Kızılırmak Mahallesi
Muhsin Yazıcıoğlu Cad.
No: 39/A-57
Çankaya - Ankara

BASEL Medikal Ltd. Şti.

BASEL