

Hydrating Cream Jalosome®

Hassas ciltler için nemlendirici krem.



Ürün Açıklaması

JALOSOME® Nemlendirici Krem, dış etkilere kaynaklanan, tahriş ve kızarıklık içeren dermal reaksiyonlar gibi cilt patofizyolojik değişiklikleri durumunda stratum corneum hidrofilik kapasitesini etkili bir şekilde korur. Tıbbi cihazdır; paraben, lateks ve gluten içermez.

Jalosome® serisi aynı zamanda cilt enflamasyonunu ve buna bağlı ağrıları azaltmak için patentli tıbbi cihaz olan JALOSOME® Yatıştırıcı Jeli de içerir.

KULLANIM ENDİKASYONLARI:

Cildin daha önce maruz kaldığı radyoterapi, kimyasal peeling gibi tedavilerin sonunda kırılan cildin cilt bütünlüğünü geri kazanması ve cildi korumak için endikedir. Doku yenilenmesine aktif olarak katkıda bulunur.

Etki Mekanizması

JALOSOME® Nemlendirici Krem cildin patofizyolojik değişimi durumunda stratum corneum'un hidrofilik kapasitesini geri kazandırır ve doku iyileşme sürecini destekleyen, nemli bir ortam yaratan farklı bileşenlerin bir emülsiyonudur.

Bileşenler	Özellikler
Aloe Barbadensis Yaprağı Ekstresi	Yatıştırıcı ve Nemlendirici
Sızma Zeytinyağı	Derinlemesine Nemlendirme
Buğday Tohumu Yağı	Besleyici
Tatlı Badem Yağı	Yatıştırıcı ve Yumuşatıcı
D-Pantenol	Yenileyici ve Yatıştırıcı

BASEL

Bileşenler:

Aloe Barbadensis Yaprağı Ekstresi, Olea Europaea Meyve Özü, Triticum Vulgare Tohumu Yağı (buğday tohumu yağı), Prunus Amygdalus yağı, D-Pantenol, yardımcı maddeler.

Sınıflandırma:

Sınıf IIa Tıbbi Cihaz

Pozoloji ve Uygulama Yöntemi:

Uygulamadan önce ellerinizi iyice yıkayınız. Yeterli miktarda ürünü alınız ve etkilenen bölgelere yumuşak ve dairesel hareketlerle uygulayınız. Tamamen emilene kadar ürünü dağıtınız. Gerekliğinde tedaviyi günde birkaç kez tekrarlayınız.

Kontrendikasyonlar:

Ürüne özel bilinen kontrendikasyon yoktur.

Özel Uyarılar ve Önlemler:

Bileşenlere karşı bir alerji durumu varsa, ürünü kullanmaktan kaçınınız. Hassasiyet ve duyarlılık durumunda tedaviyi durdurup, doktorunuzu bilgilendiriniz. Ürünü kullandıktan sonra çevreye atmayınız. Yutmayınız.

İlaçlarla etkileşimler ve diğer etkileşim biçimleri:

Bilinen etkileşim bulunmamaktadır.

Yan Etkileri:

Bilinen bir yan etkisi yoktur. Bileşenlere karşı aşırı duyarlılık ve alerji olması durumunda ürünü kullanmayınız, tedaviyi durdurup, doktorunuzu bilgilendiriniz.

Uyumsuzluk:

Bilinen bir uyumsuzluk bulunmamaktadır.

Son Kullanma Süresi:

Ürün, açılmamış ve ambalajında doğru bir şekilde depolandığında, üretim tarihinden itibaren 35 ay içinde kullanılmalıdır.

Depolama için Özel Önlemler:

Serin ve kuru bir yerde, ısı, ışık ve nem kaynaklarından uzakta muhafaza ediniz. Ürün ilk açıldığında kutusu hasarlı veya tamamen sağlam değilse ürünü kullanmayınız. Ürünü paket üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

BASEL

BASEL Medikal Ltd. Şti.

Kızılırmak Mahallesi

Muhsin Yazıcıoğlu Cad.

No: 39/A-57

Çankaya - Ankara

T : +90 312 441 6265

F : +90 312 441 6267

M : +90 530 711 5989

www.radyoterapijeli.com